



新発売!! **ガイドッド サージェリー キット**




3.0mm

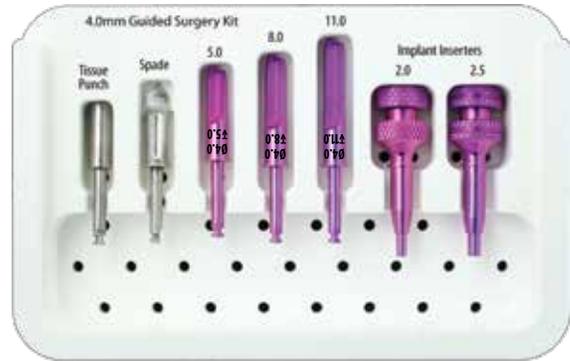

4.0mm

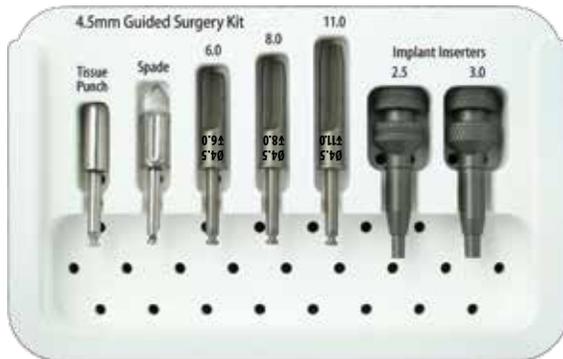


4.5mm

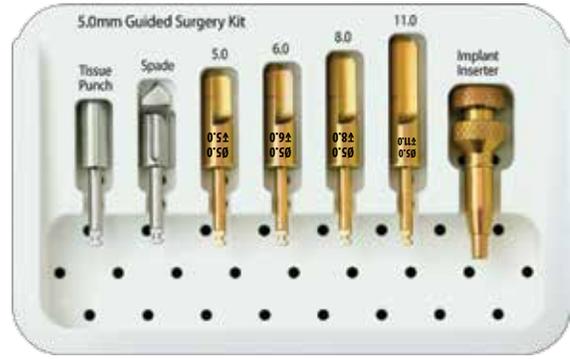

5.0mm

製品番号	製品名
260-101-830	3.0mm ガイデッド サージェリー キット
260-101-840	4.0mm ガイデッド サージェリー キット
260-101-845	4.5mm ガイデッド サージェリー キット
260-101-850	5.0mm ガイデッド サージェリー キット

インプラント体の直径に従って、ガイドッド サージェリー キットをご選択下さい。

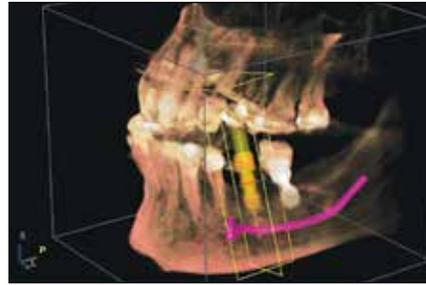

CTで得た3Dデータをもとに、サージカルガイドを作製します。


サージカルガイドを安定させ、ティッシュパンチを使用したフラップレス手術とします。



スベードリルを用い、外部注水にて400回転/分でドリリングします。

50回転/分、無注水下で、ガイドリーマーにより埋入予定のインプラントサイズまでインプラント窩を形成し、自家骨を採取します。

ガイドインサーターを使用し、インプラント体を埋入します。


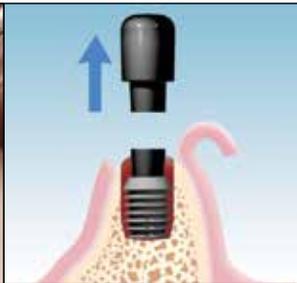


ヒーリングプラグを挿入する前にサージカルガイドを外します。

口腔内または口腔外でヒーリングプラグを切断し、インプラント体へ装着します。



自家骨をインプラントショルダ一部へ補填します。

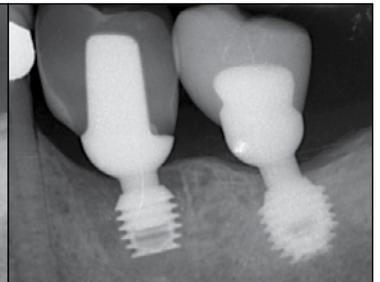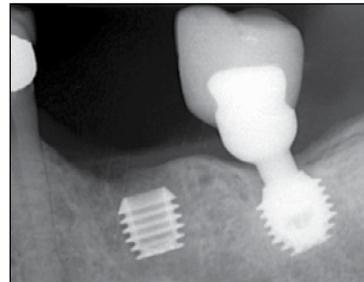



5.0x5.0mmインプラント埋入後

IAC(Integrated Abutment Crown) 装着後



ガイドインサーターの使用法 »

ガイドインサーター本体がインプラントショルダ一部の上に来るまでノブを回します。

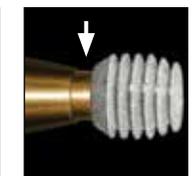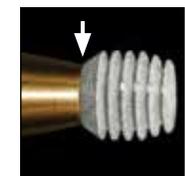

ガイドインサーターがインプラント体に適切に装着された状態。

正

誤