



2024年4月1日(月)より日本発売開始!

スキャナブル テンポラリーアバットメント

NEW!!



レッド = 2.0mm Post



ブルー = 2.5mm Post



グリーン = 3.0mm Post

インプラント埋入時に口腔内光学印象が可能に!

2次オペ時にクラウンセットもできます。



Download digital librariesはこちら:
www.bicon.com/digital



STAご使用手順はこちら:

■スキャナブル テンポラリーアバットメント (STA) ガイド■ アバットメントに記載されている印は以下情報を示しています。

- ・色と窪み : アバットメントポストのサイズ (2.0, 2.5, 3.0mm)
- ・数字 : アバットメントのシリーズ (4,5,6,7シリーズ)
- ・数字とアルファベットを囲む円 : シャフトの長さ(トール3.0mmのみ記載)
- ・高径に記載の「T」「X」 : 「T」高径がトールサイズのもの・「X」高径がエクストラトール




シリーズ 4
2.5mm 高径
トールシャフト




シリーズ 5
4.5mm 高径
スタンダード

*トールシャフトはスタンダードシャフトよりも
2.0mm長めに設定されております。
こちらの製品はインプラント埋入時の深度が
理想よりも深く埋入された場合に有効です。

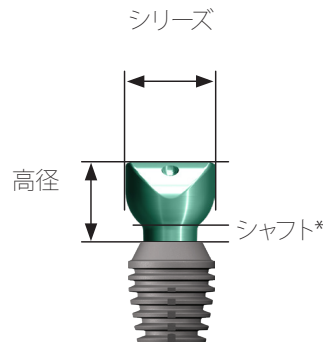



2.0mm Post

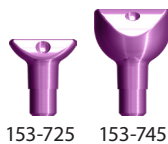

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
143-725	4	2.5mm	スタンダード 1.0mm
143-795	4	2.5mm	トール* 3.0mm
143-745	4T	4.5mm (T)	スタンダード 1.0mm
143-796	4T	4.5mm (T)	トール* 3.0mm

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
153-725	5L	2.5mm (L)	スタンダード 1.0mm
153-745	5	4.5mm	スタンダード 1.0mm


2.5mm Post

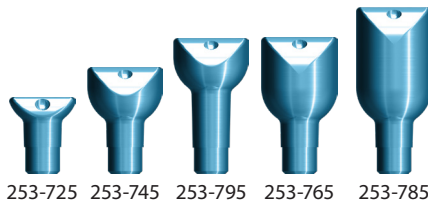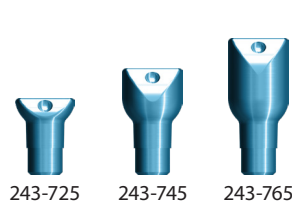

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
243-725	4	2.5mm	スタンダード 1.0mm
243-745	4T	4.5mm (T)	スタンダード 1.0mm
243-765	4X	6.5mm (X)	スタンダード 1.0mm

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
253-725	5L	2.5mm (L)	スタンダード 1.0mm
253-745	5	4.5mm	スタンダード 1.0mm
253-795	5	4.5mm	トール* 3.0mm
253-765	5T	6.5mm (T)	スタンダード 1.0mm
253-785	5X	8.5mm (X)	スタンダード 1.0mm

3.0mm Post

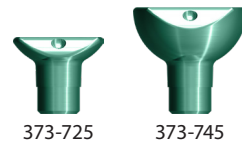

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
353-725	5L	2.5mm (L)	スタンダード 1.0mm
353-745	5	4.5mm	スタンダード 1.0mm
353-795	5	4.5mm	トール* 3.0mm
353-765	5T	6.5mm (T)	スタンダード 1.0mm
353-796	5T	6.5mm (T)	トール* 3.0mm
353-785	5X	8.5mm (X)	スタンダード 1.0mm

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
363-725	6L	2.5mm (L)	スタンダード 1.0mm
363-745	6	4.5mm	スタンダード 1.0mm
363-765	6T	6.5mm (T)	スタンダード 1.0mm

製品番号	シリーズ	高径	シャフト
373-725	7L	2.5mm (L)	スタンダード 1.0mm
373-745	7	4.5mm	スタンダード 1.0mm

ー下記製品の直径はパッケージ記載のものと実際のサイズが異なりますー

製品番号	PKG記載の直径	実際の直径	適合UA	製品番号	PKG記載の直径	実際の直径	適合UA
143-725	4.0mm	3.8mm	UA4 SP UA	253-725	5.0mm	4.4mm	UA5 LP UA
143-795	4.0mm	3.8mm	UA4 SP UA	353-725	5.0mm	4.6mm	UA5 LP UA
153-725	5.0mm	4.4mm	UA5 LP UA	363-725	6.5mm	5.3mm	UA6 LP UA
243-725	4.0mm	3.9mm	UA4 SP UA	373-725	7.5mm	6.0mm	UA7 LP UA
243-795	4.0mm	3.9mm	UA4 SP UA				

STA の特長

スキャナブルテンポラリーアバットメントは、一回法でのインプラント埋入時またはその後も口腔内光学印象が可能になり効率化を提供します。

・テンポラリーアバットメントおよびスキャンボディとして同時に使用可能。

・インプラント埋入時に口腔内光学印象採得を行うことができ、患者様の来院数を軽減。

・2次オペ時にクラウンのセットも可能。



全ての製品番号の前に“260-”がついております。
承認番号: 208008ZG00046000